

Gebrauchsanweisung

Praktische Tipps

Scarban® wirkt bei alten und neuen Narben (hypertroph/keloid).

Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, sollte der Scarban®-Silikonverband täglich für mindestens zwölf aufeinanderfolgende Stunden getragen werden.

Narbenheilung braucht Zeit. Die Behandlung von Narben mit Scarban® dauert bis zu drei bis sechs Monate.

Verwenden Sie Scarban® nur, wenn die Wunde vollständig verheilt ist und weder Fäden noch Schorf vorhanden sind.

Verwenden Sie Scarban® solange die Narbe erhaben oder rot ist bzw. Beschwerden verursacht.

In seltenen Fällen kann die Haut empfindlich (Hautreizung) auf eine Behandlung mit Silikon reagieren. Beenden Sie die Behandlung, bis sich die Haut von der Reizung erholt hat. Beginnen Sie die Behandlung erneut und gewöhnen Sie die Haut in kleineren Schritten (eine Stunde täglich) an den Verband.


Bei richtiger Anwendung und Pflege reicht eine Scarban®-Packung für sechs bis acht Wochen Narbenbehandlung.

Es wird empfohlen, eine gute feuchtigkeitsspendende Creme in der Zeit zu verwenden, in der Scarban® nicht angewendet wird.

Beim Schwimmen oder intensiven Training sollte der Scarban®-Silikonverband vorübergehend abgenommen werden. Legen Sie den Verband nach dem Sport wieder an.

Schützen Sie die Narbe vor schädlicher UV-Strahlung. Sonneneinstrahlung kann schnelleren Sonnenbrand und dauerhafte Verfärbungen der Narbe hervorrufen. Der Scarban®-Silikonverband bietet standardmäßig einen sehr hohen UV-Schutz.

Weil jede Narbe Pflege benötigt!
scarban.de
narbenexperten.de

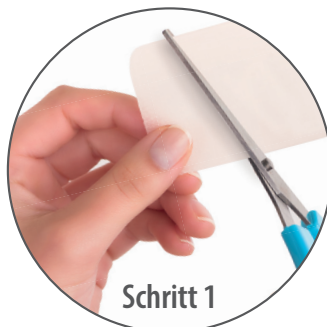

Schritt 1

Bei Bedarf kann der Scarban®-Silikonverband auf die passende Größe zugeschnitten werden. Um die Narbe herum muss ein Bereich von 2 cm ebenfalls von dem Silikonverband bedeckt sein.



Schritt 2

Für eine gute Haftkraft und Haltbarkeit des Scarban®-Silikonverbands sollten Haare um die Narbe herum entfernt werden. Vor der Auflage des Verbands die Haut gründlich reinigen und trocknen.



Schritt 3

Die Schutzfolie vom Scarban®-Silikonverband entfernen.



Schritt 4

Die Klebefläche des Scarban®-Silikonverbands auf die Narbe auflegen (nicht auf eine offene Wunde).



Schritt 5

Fixieren: Bei Bedarf kann der Scarban®-Silikonverband zusätzlich mit einem Pflasterverband oder einer elastischen Binde fixiert werden. (Dies ist normalerweise nicht erforderlich.)



Schritt 6

Reinigen: Für eine gute Hygiene und zum Erhalt der Haftkraft sollte der Scarban®-Silikonverband täglich gereinigt werden (z. B. beim Duschen). Den Verband mit ein paar Tropfen der Scarban®-Silikon-Reinigungsseife oder einer neutralen Seife einreiben.



Schritt 7

Spülen: Den Scarban®-Silikonverband gründlich unter lauwarmem fließendem Wasser spülen, bis alle Schmutz- und Seifenrückstände entfernt sind.



Schritt 8

Trocknen: Den Scarban®-Silikonverband (mit der Klebefläche nach oben) auf einer trockenen, fusselfreien und sauberen Oberfläche trocknen lassen. Beim Trocknen rollt sich der Verband automatisch auf und gewinnt seine Haftkraft allmählich wieder. Danach kann Scarban® wieder verwendet werden.



Fingerverband

Superelastischer Silikonverband (30 x 2,5 cm) für die Behandlung des gesamten Fingers (umlaufend). Immer an der Fingerspitze beginnen und in Richtung Körper (Herz) abwickeln. Die Druckverteilung sollte ausgeglichen sein. Druck unterstützt die Narbenbehandlung.



Web-space



Spezieller, vorgeformter, dicker, elastischer Silikonverband für den Zwischenraum zwischen Daumen und Zeigefinger.
Maße: 10,5 x 4 cm.



Finger*

Schritt 1: Eine Creme auf den behandlungsbedürftigen Finger auftragen, sodass er leicht in den Silikonfinger gleitet (d. h. nicht der Kompressionsschlauch).



Schritt 2: Den Scarban® Kompressionsschlauch vorsichtig anhand von Hin- und Herbewegungen über den Silikonfinger ziehen. Der Kompressionsschlauch unterstützt die Narbenbehandlung.



Schritt 3: Beim Abnehmen des Scarban® Fingers zuerst den Kompressionsschlauch von dem Finger abrollen (von unten nach oben). Dann den Silikonfinger vorsichtig abnehmen.



Hand**

Schritt 1: Auf die behandlungsbedürftige Hand (vor allem auf die Finger) Creme auftragen. So gleitet die Hand problemlos in den Scarban®-Silikonhandschuh.



Schritt 2: Den Bund des Scarban®-Silikonhandschuhs zur Außenseite nach unten rollen. Den Handschuh dann anziehen, indem die Handschuhfinger vorsichtig anhand von Hin- und Herbewegungen über die Finger gezogen werden.



Schritt 3: Wenn der Handschuh vollständig angelegt wurde, den Bund zurückrollen. Beim Abnehmen des Scarban®-Handschuhs den Bund nach außen falten. Dann vorsichtig an den Fingerkuppen ziehen und den Handschuh langsam abziehen.